



Instalmed
Instalaciones medicinales

Manejo de flexibles de alta presión en centrales de gas medicinales.

Instrucciones para conexión de los flexibles.

- 1) El cilindro debe ubicarse en su posición correcta, próxima a la conexión del flexible y la salida de la válvula del mismo orientada a dicha conexión
- 2) Nunca deben retorcer y/o deformarse los flexibles.
- 3) El cilindro debe asegurarse al soporte con las cadenas correspondientes.
- 4) La válvula de la central del banco correspondiente debe estar cerrada.
- 5) Verificar que la conexión del flexible cuente con la junta correspondiente y este en buen estado, de no ser así sustituirla. **NO PONER MAS DE UNA JUNTA.**
- 6) Verificar el buen estado de la tuerca de conexión y su rosca.
- 7) Verificar el buen estado de la rosca de la válvula del cilindro.
- 8) Una vez conectados todos los cilindros del banco, abrir lentamente las válvulas de los cilindros y comprobar con agua jabonosa que no existan pérdidas.
- 9) Si todo están correctos, abrir la válvula de la central y habilitar el banco. Si existen pérdidas, proceder de acuerdo a indicaciones para desconexión.

Instrucciones para desconexión de los flexibles.

- 1) La válvula de la central del banco correspondiente debe estar cerrada.
- 2) Cerrar las válvulas de los cilindros conectados en ese banco.
- 3) Aflojar la tuerca de conexión del flexible lentamente, hasta despresurizar el banco.
- 4) Retirar los cilindros vacíos, reponer por llenos, de acuerdo a instrucciones para conexión.